

ANLEITUNG ZUM ANTIGEN-NASENBOHRER- TEST (FLOWFLEX-SELBSTTEST)

WICHTIG

- 30 MINUTEN VOR DEM TEST NICHT ZÄHNE PUTZEN, ESSEN ODER RAUCHEN.
- WASSER TRINKEN IST ERLAUBT!

EXTRAKTIONSPUFFERRÖHRCHEN



EINWEGTUPFER



TESTKASSETTE



COVID-19 NACHGEWIESEN
DIE SCHULE INFORMIERT ELTERN/
ERZIEHUNGSBERECHTIGTE UND
DIE ÖRTLICHE GESUNDHEITSBEHÖRDE.

COVID-19 NICHT NACHGEWIESEN
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH, GESUND BLEIBEN
UND WEITER DIE SCHULE BESUCHEN!

1




- Schnäuzen vor dem Test
- Halterung zusammenbauen
- Röhrchen mit Pufferlösung aufschrauben und in die Halterung stellen, ohne es zu drücken
- Stäbchenverpackung mit einer Schere aufschneiden

2




- Tupfer ca. 2,5 Zentimeter in ein Nasenloch einführen
- Das Stäbchen 5 Mal drehen, dabei sanft gegen die Schleimhaut pressen
- Vorgang im anderen Nasenloch wiederholen

3

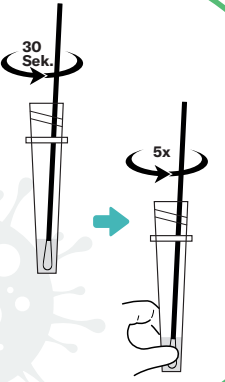

- Röhrchen mit Pufferlösung aus der Halterung nehmen
- Das Stäbchen einführen und 30 Sekunden umrühren
- Röhrchen zusammendrücken und währenddessen das Stäbchen mindestens 5 Mal drehen
- Aufpassen, dass Flüssigkeit nicht aus dem Röhrchen spritzt!

4

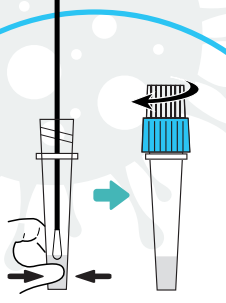


- Stäbchen entnehmen und dabei Röhrchen zusammendrücken
- Gebrauchtes Stäbchen wieder in die Verpackung schieben
- Kappe mit Tropferspitze fest aufdrehen
- Röhrchen wirbeln und schütteln

5




- Testkassette aus der Verpackung nehmen und flach auf den Tisch legen
- Kappe von der Tropferspitze abdrehen
- Röhrchen vorsichtig zusammendrücken und 4 Tropfen auf Testkassette tropfen (Vertiefung S)

6



- 15 Minuten warten
- Das Ergebnis ablesen

7

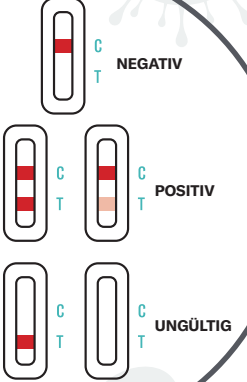

Ergebnisinterpretation

- NEGATIV (C line only)
- POSITIV (C and T lines)
- UNGÜLTIG (C and S lines)